



## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### Hogy figyelmesen olvassa el a használati útmutatót


Kérjük, először a helyi képviselővel vegye fel a kapcsolatot, ha bármilyen kérdése merül fel. A legfrissebb információkért és termékbemutatóhoz látogassa meg a nemzetközi [www.respisenze.com](http://www.respisenze.com) weboldalt. Észrevételeit és javaslatait elküldheti a [support@infantrust.com](mailto:support@infantrust.com) email címre.

**FONTOS:** A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen az utasításokat • Őrizze meg az útmutatót a teljes élettartam alatt • A légzésfigyelő nem képes minden légzéssel kapcsolatos veszély érzékelésére • Ne használjon övet, pántot a készülék rögzítésére, mert az veszélyeztetheti a baba épségét • Ellenőrizze a készüléket minden használat előtt, és ne használja ha az megsérült, elhasználódott, vagy nem megfelelően működik • A készüléket csak olyan helyzetben szabad használni, ahol egy felügyelő személy a veszélyeztetést észlelni tudja • Tartsa a készüléket biztonságos helyen, gyermekektől távol a használaton kívül • A készülék kisebb alkatrészeket tartalmaz, melyek szétszerelve veszélyesek lehetnek a baba számára • Tegye félre a csomagolás azon elemeit, melyek veszélyt jelenthetnek a gyermek számára • Bizonyos esetekben szívűtődő újraélesztés (CPR) alkalmazása lehet szükséges, hogy újraélesszük a gyermeket.


Ügyeljen arra, hogy a fokozottabb külső mozgások befolyásolhatják a légzésfigyelőt, mint pl. a babakocsi toléása egyetlen felszínen, vagy éppen más személy is hozzáér a készülékhez működés közben. Ezekben az esetekben a légzésfigyelő nem képes megbízhatóan különbséget tenni a baba és a külső mozgás között.

**Nyilatkozat:** Ez a légzésfigyelő készülék szülői segédeszköz, nem orvosi berendezés, valamint nem helyettesíti az emberi gondoskodást, segítségnyújtást. Csak biztonságos üzemeltetési körülmények között és felelősséggel szabad használni, a jelen útmutatóban foglaltak teljes körű betartásával. A diagnózis felállítás és a betegség figyelemmel kísérése szakorvos feladata. A készülék nem használható légzőszervi problémákra, és nem életmentő helyzetekre tervezett. Mivel a készülék a baba mozgását és nem pedig a légmozgást érzékeli, a készülék nem alkalmas obstruktív apnoé (légzésszünet) kimutatására és egyéb légzőszervi betegségek diagnosztizálására. Ez az orvos feladata. A felhasználók a készüléket saját felelősségükre használhatják, és az Infantrust Parenting Solution Ltd., annak alkalmazottai, ügynökei, beszállítói, gyártói, nemzetközi forgalmazó partnerei („INFUNTRUST”) semmilyen körülmények között sem felelősek bármilyen veszteséget, sérülést, értékvesztést, beleértve a következményként keletkezett sérülést vagy értékvesztést, melyet az ügyfél vagy bárki más szenved el a készülék vonatkozásában, és bármilyen garancia, legyen az kifejezett, vonatkoztatott vagy hallgatolagos, valamint bármilyen okból származó egyéb kötelezettség, az ügyfél felmenti INFANTRUST-ot bármely efféle kötelezettség és felelősség alól.

### A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE

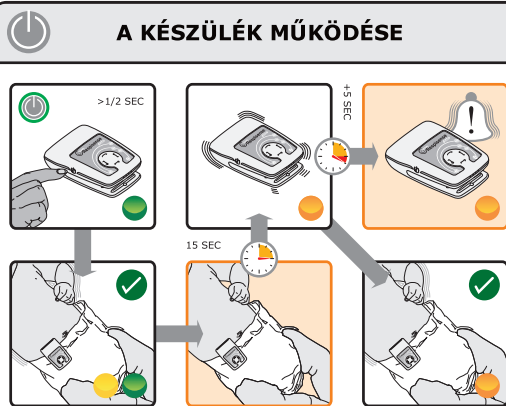


### FOKOZOTT ÉRZÉKENYSÉG MÓD



A készülék a kikapcsolást követően jelzi az elem töltöttségi szintet.

### KAPCSOLJA BE A KÉSZÜLÉKET



### A KÉSZÜLÉK FELHELYEZÉSE




- HELYEZZE FEL A PELENKÁT
- HAJTSA LE A PELENKA SZÉLÉT
- SIMÍTSA RÁ A LEHAJTOTT RÉSZT A PELENKÁRA
- KAPCSOLJA BE A KÉSZÜLÉKET
- CSÚSZTASSA RÁ A KÉSZÜLÉKET A PELENKA SZÉLÉRE

### RIASZTÁSOK

- Az elsődleges riasztóhang (gyors trillázó hang) akkor szólal meg, ha 20 másodpercen keresztül nem észlelhető mozgás. Annak ellenére, hogy ez azt jelentheti, hogy a baba sürgős beavatkozást igényelne a gondozótól vagy orvostól, legjobb ha a lehető legnyugodtabban reagál. Soha ne rázza a gyermeket!
- A másodlagos riasztás (lassú trillázó hang) akkor szólal meg, ha a légzés stimulator már háromszor aktiválódott, de a mozgás visszatért a stimuláció aktiválódást követő öt másodpercen belül. Ez jelezheti azt is, hogy a készülék vagy a pelena nem tökéletesen felhelyezett, vagy a pelena túl nedvessé vált, és lehúzta a készüléket a baba hasáról, vagy megszűnt a mozgás, de visszatért a stimulációt követően. Igazítsa szorosabbra a pelenkát, cserélje le ha nedves, vagy használja a következő méretű pelenkát.

### TICK HANGJELZÉS

A készülék bekapcsolt állapotában nyomja meg a BEKAPCSOLÓ gombot, melyet követően TICK hang jelzi a mozgás érzékelést. Nyomja meg még egyszer a gombot az érzékelő funkció kikapcsolásához. Ez a ciklus ismétlődhet.

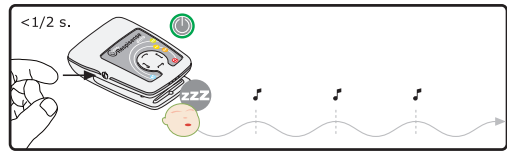

### KÉSZÜLÉK ÉS ELEM ELLENŐRZÉS

A piros fény akkor világít, ha rendszerhiba lép fel, vagy az elem már közelít élettartama végéhez.



**KÉK FÉNY** villog, ha az érintkezés megszakadt a baba hasával. Igazítsa meg a pelenkát vagy a légzésfigyelőt a megfelelő érintkezéshez.

**Használati tanácsok:**

- A megbízható működéshez ellenőrizze, hogy a pelena megfelelően van-e rögzítve a babára, és elég nagy-e, hogy a készülék érzékelje a baba köldökének szintjéhez közel legyen. A baba hasának mozgása legkönnyebben a köldökéhez közel érzékelhető. Ha a készülék nehezen érzékeli a mozgást, a pelena nem illeszkedik eléggé, vagy túl kicsi.
- Ha a használt pelena túl vékony, hajtson egy ruhadarabot a pelena szélére, és erre csuszassa rá óvatosan a készüléket, ügyelve arra, hogy a klippet el ne törje. Ha a készülék lecsúszik valami miatt a pelenkáról, már nem képes érzékeli a mozgást, és riasztani fog.
- Győződjön meg arról, hogy az érzékelő rész megfelelően érintkezzen a baba hasával a használat alatt.

**Babőr / babamonitor használata (opcionális):** Otthona távolabbi részeiben is meghallhatja a riasztás hangját, ha a szükségleteinek megfelelő egy- vagy kétutas babőröt vásárol. Választhat egyszerű hanggal működő babórt, vagy hang / kép továbbított babamonitort is, digitális vagy analóg üzemi, egy vagy többcsatornás babórt, elemes vagy tölthető akkumulátoros kivitelben. Kérjese az alkalmazott eszköz használati útmutatójának előírásait és tesztelje a kombináció teljesítményét, hogy megfelelően hallhassa a légzésfigyelő riasztását. Esetleg használhat vezeték nélküli otthoni telefont is belső hívás módban.

**Figyelem:** Ha a baba a hasán vagy oldalán fekszik, gyengéden igazítsa arább a készüléket a megfelelő érintkezéshez és működéshez

### FIGYELEM

**Figyelem:** Ne használja a készüléket túl vastag pelena széllel vagy övvel, mert eldelformálhat vagy eltörhet a készülék klipse.


**Tisztítás:** A készüléket puha, nedves ruhadarabbal tisztítsa. Ne merítse vagy mártsa a készüléket folyadékba. Ha a készüléke folyadék került rá, a garancia érvényét veszti. Ne használjon vegyi anyagot a tisztáshoz, mert irritálhatja a baba bőrét.

### ZÖLD

A zöld "zzz" jelzőfény villog ritmikus mozgás érzékelése esetén, általában amikor a baba pihen.

### SÁRGA

A sárga színű "..." jelzőfény az általános mozgás érzékelése esetén villog, amikor a baba felébred és aktív.

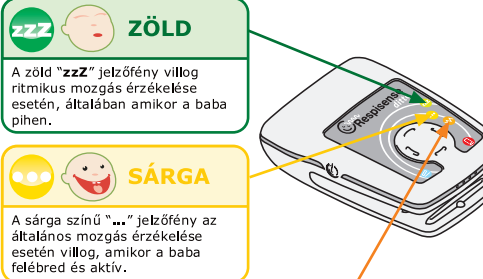


### NARANCS

A narancs fény ismételt villog, ha a TummyTickle stimulator aktív, vagy a riasztás hang hallható. Ha a TummyTickle funkció aktiválódott legalább egyszer, akkor ez a fény fog villogni a mozgás alatt a zöld vagy sárga szín helyett.

### Figyelem: Tűz és égés veszély

- Ne töltsse, ne szedje szét, ne nyomja össze, ne tegye tűzbe vagy magas hőmérsékletű helyre (100°C)
- Tartsa távol gyermekektől
- Tárolja az eredeti csomagolásában a használatig
- Az elhasznált elemeket azonnal távolítsa el
- Ne vegye az elemet a szájába
- Kerülje a tárolást közvetlen napfényen, magas hőmérsékleten, vagy páratartalmon
- Kerülje a bepirásodást.

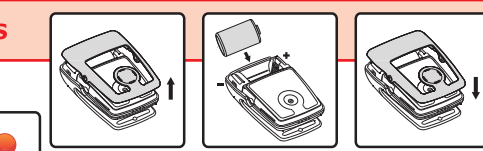

**Garancia:** Az INFANTRUST 2 év garanciát biztosít a termékre a vásárlás dátumától számítva. A garancia csak a számla és jótállási jegy felmutatásával érvényes! A garancia az elemre nem vonatkozik. A garanciális időtartama alatt INFANTRUST cseregaranciát vállal az anyaghibából vagy gyártási hibából adódó meghibásodásokra, de a szállítási költség a vevőt terheli. Nemzetközi garancia vonatkozik a termékre azokban az országokban, ahol a termékek van hivatalos disztribútora. A garancia érvényét veszti külső behatás, illetéktelen szerelés, felnyitás, törés által okozott meghibásodás esetén.

**Műszaki adatok:**  
 Elem: Respisenze ER14250M 3.6V Lithium.  
 Az Infantrust Parenting Solutions (Pty) Ltd. (PO Box 3316, Matieland, 7602, South Africa.) által Dél-Afrikában tervezett és gyártott.  
 A terméket a ZA2006/01793 és GB2419961 szabadalmi jogok védik.  
 Minden jog fenntartva a Respisenze, Infantrust, TummyTickle nevekre, logókra és márká jelölésekre.  
 A Respisenze légzésfigyelő fejlesztése érdekében a készülék megjelenése, műszaki adatai változhatnak előzetes értesítés nélkül.

### A KÉSZÜLÉK REGISZTRÁLÁSA

A készülék regisztrálása: Készülékét regisztrálhatja vásárlást követően a [www.respisenze.com](http://www.respisenze.com) nemzetközi honlapon. A regisztrációt követően fényképet tölthet fel a Respisenze weboldal albumba. Az összegyűjtött információk csak a készülék tökéletesítésére és szervizelésére kerülnek felhasználásra, és az Infantrust üzleti politikájának értelmében nem kerülnek egyéb felhasználásra, másoknak történő kiadásra.